



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Vertise Flow A3.5 EXP 31.10.2024

Pret:

89,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Primul compozit fluid auto-gravant si auto-adeziv.
O noua categorie revolutionara a aparut in clasa compozitelor.

Beneficii

- Procedura simpla si rapida.
- Reduce sensibilitatea post-operatorie.
- Control usor al umiditatii.
- Reduce sansa pentru erori umane datorate protocolului pentru sistemul adeziv.
- Aplicare rapida in cazul pacientilor cu probleme.
- O mai placuta experienta pentru pacient .
- Produs benefic pentru tratamentul pedodontic comparativ cu glass-ionomerii sau sigilantii
- Vertise Flow reduce numarul de etapelor procedurale, comparativ cu utilizarea unui sistem adeziv intr-un singur pas cu un compozit fluid traditional.

Mod de aplicare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- - 1) Aplicati Vertise Flow in cavitate prin intermediul varfului aplicator.
 - 2) Aplicati cu pensula un strat subtire de Vertise Flow pe toti peretii cavitatii si zona bizotata
 - 3) Fotopolimerizati 20 de secunde
 - 4) Construiti restaurarea in continuare cu Vertise Flow in straturi cu grosimea de 2mm sau mai putin.
 - 5) Fotopolimerizati fiecare strat 20 de secunde.
 - 6) Finisati si lustruiti.

Prezentare

- 1 x seringa 2g
- nuante: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL, Translucent