



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

MTA Repair HP 5 doze EXP 30.01.2025



Pret:

336,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

MTA REPAIR HP

Ciment bioceramic reparativ

Indicatii :

- accidente si complicatii endodontice
- obturatii retrograde
- pulpectomii
- apexifiere
- ca baza inainte de obturatia de canal in cazul unui apex larg



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici :

- plasticitate ridicata
- fara bismuth oxide
- eliberare de ioni de calciu
- alcalinitate ridicata
- doze unice

Beneficii :

- nu exista risc de contaminare sau metale grele
- o mai buna manipulare si modalitate de insertie
- nu pateaza structura dentara
- induce biomineralizarea
- previne dezvoltarea bacteriilor
- optimizarea timpului de utilizare

Întrebări despre acest produs

Care sunt principalele proprietăți ale MTA HP REPAIR ?

Chimice:

- Eliberarea de ioni de Ca - permite formarea țesutului remineralizare.
- Puternic alcalin – nu permite dezvoltarea bacteriilor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fizice:

- Solubilitate scăzută - pot fi utilizate în mod direct pe pulpă și țesuturi periapicale
- rezistență la compresiune: 44,2 MPa - poate fi folosit ca material de bază
- Extindere prin hidratare - produce etanșare totală a cavităților
- timp de setare: 15 minute - poate fi utilizat într-o singură sesiune
- Radioopacitate - permite monitorizarea cu raze X ulterioară (observație proactivă)

Biologice:

- Biocompatibilitate - poate fi utilizat direct pe țesuturile vii
- Remineralizarea dentinei - formarea unei bariere biologice
- Etanșare biologică a perforatiei - vindecarea completă a țesuturilor periradiculare

Care este diferența dintre MTA ANGELUS și MTA HP REPAIR?

- Diferența constă în înlocuirea apei distilate(MTA Angelus) printr-un lichid care conține apă și un alt plastifiant organic care conferă plasticitate ridicată a produsului(MTA HP REPAIR)
- Înlocuirea radiopacifier-ului (de la Bismuth oxid la Calciuy Tungaste), asigurând absența decolorării dentare.

Care sunt indicațiile pentru MTA HP REPAIR ?

- Tratamentul perforatiilor de canal și a furcatilor radacinilor.
- Sigilarea resorbțiilor interne.
- Material Retrofilling pentru operațiile paradontotice.
- Coafaj direct și pulpectomii.
- Apexifiere și apexigeneza.
- Sigilarea radacinilor înainte de tratamentul endodontic de albire.

Cum se aplica MTA HP REPAIR?

Acesta poate fi aplicat cu Aplicatorul de MTA Angelus.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

- Pachet cu 5 capsule pulbere, 0.85 grame fiecare si 5 flacoane lichid (apa + plastifiant organic)