



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Concetrat curatare rasini printate Saremco 3L



Pret:

**590,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Solutie de curatare pentru imprimante 3D pe baza de rasina.

Detergent concentrat pe baza de apa pentru inlocuirea alcoolului izopropilic

Inteligent - curatare perfecta si rezultate constante in timp

Prietenos cu mediul - solutia ideala pentru un mediu mai bun

Capacitate de curatare - superior IPA (alcool izopropilic) si etanol

Din 3 L de produs concentrat se obtin 17 L de solutie de curatare

### Avantaje

Solutie de curatare ecologica pe baza de apa



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Alternativa superioara la alcoolul izopropilic (IPA) si etanol

Curatarea perfecta si fara reziduuri a dispozitivelor imprimate 3D (fiabilitatea procesului)

Protejeaza proprietatile fizice ale dispozitivelor imprimate 3D, spre deosebire de PAH si etanol

Conform REACH/SVHC

Usor de biodegradabil

Miros neutru

Poate fi folosit in dispozitive cu ultrasunete

Nu este inflamabil

Non-coroziv

## **PROTOCOL DE AMESTECARE**

**PREGATIRE** - Pentru a obtine o solutie de curatare omogena, este esential sa cantariti produsul deoarece masuratorile de volum sunt imprecise.

**AMESTECARE** - Adaugati 4 parti de apa demineralizata si 1 parte de produs concentrat. Agita bine.

**VERIFICARE** - Solutia amestecata devine cristalina dupa cateva minute.

## **PROTOCOL DE CURATARE**

1. Spalati piesele imprimate scufundate in lichid de curatare sau in dispozitive de spalare cu ultrasunete sau imprimare 3D - 3 minute.
2. Clatiti bine cu apa calda.
3. Eliminati excesul de rasina cu aer comprimat.
4. Repetati procesul: solutia de curatare pentru a doua spalare trebuie macinata.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---