



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piesa Contraunghi (E1) pentru E-Connect Pro Sifary



Pret:

789,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Piesa contraunghi (E1) este un accesoriu de bază pentru micromotoarele din gama E-Connect Pro de la Sifary, destinat utilizării în procedurile de endodonție și stomatologie generală. Aceasta este realizată din materiale de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la uzură. Având o transmitere precisă a rotației și un raport de 1:1, asigură eficiență în tratamentele dentare și precizie în manevră. Designul permite o utilizare comodă și minimizarea oboselei pentru operator.

Componente principale:

1. **Cap contraunghi din oțel inoxidabil** – Rezistent la uzură și sterilizare repetată.
2. **Mecanism intern de transmisie** – Oferă un raport de rotație precis de 1:1.
3. **Inel de etanșare albastru** – Oferă siguranță suplimentară pentru prevenirea pătrunderii lichidelor.
4. **Conector universal** – Compatibil cu majoritatea micromotoarelor din gama E-Connect Pro.
5. **Design ergonomic** – Pentru manevrare facilă și confort în utilizarea prelungită.

Caracteristici tehnice:

- **Material:** Oțel inoxidabil de înaltă calitate.
- **Raport de transmisie:** 1:1 (transmisie directă).
- **Compatibilitate:** E-Connect Pro și alte sisteme similare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Temperatura de sterilizare:** Rezistent până la 134°C.
- **Dimensiuni:** Lungime totală de 90 mm.
- **Greutate:** 80 grame.
- **Sterilizabil:** Autoclavabil la 134°C.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că piesa contraunghi este conectată corect la micromotor.
2. Verificați ca accesoriile și burghiile utilizate să fie compatibile cu piesa contraunghi.
3. Utilizați contraunghiul la viteza recomandată pentru procedura specifică.
4. După utilizare, deconectați piesa și curățați-o conform protocolului clinic de sterilizare.
5. Sterilizați piesa contraunghi la temperaturi de până la 134°C în autoclave.

Notă:

Piesa contraunghi este destinată exclusiv uzului profesional în clinici stomatologice și trebuie manipulată conform instrucțiunilor producătorului. Este esențial ca piesa să fie sterilizată după fiecare utilizare pentru a asigura siguranța și igiena corespunzătoare.