



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Piesa Contraunghi (E2) pentru E-CONNECT S - SIFARY



**Pret:**

**960,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Contraunghiul E2 este special conceput pentru a fi utilizat împreună cu motorul E-CONNECT S. Acesta prezintă o construcție robustă din materiale de calitate superioară, având un design ergonomic care oferă confort și precizie în timpul intervențiilor. Piesa este autoclavabilă, asigurând un nivel ridicat de igienă și siguranță.

### Componente principale:

- Corp din aliaj de aluminiu, ușor și rezistent.
- Cap rotativ ergonomic pentru acces facil în zonele dificile.
- Conector de prindere rapidă, compatibil cu E-CONNECT S.
- Indicator de autoclavare la 134°C.

### Caracteristici tehnice:

- Raport de transmisie: 1:1.
- Autoclavabil la 134°C.
- Material: Aliaj de aluminiu și oțel inoxidabil.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Design ergonomic pentru o manipulare confortabilă și sigură.
- Compatibilitate: E-CONNECT S.

### **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Montați piesa contraunghi pe motorul E-CONNECT S asigurându-vă că se fixează corespunzător.
2. Ajustați viteza și cuplul în funcție de procedura dorită.
3. După utilizare, piesa trebuie dezinfectată și sterilizată în autoclav conform specificațiilor producătorului.
4. Evitați impacturile sau căderile, care pot deteriora mecanismul intern.

### **Notă:**

Această piesă contraunghi este destinată exclusiv utilizării profesionale în cabinetele stomatologice și trebuie manevrată conform instrucțiunilor. Orice utilizare necorespunzătoare poate duce la deteriorări sau disfuncționalități.