



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Dezinfectant suprafete Incidin Liquid 5L



**Pret:**

**395,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Dezinfectant rapid de suprafete mici, pentru aparatura medicala.

### Cu aviz biocid Conține

- amestec de alcooli (2-propanol și 1-propanol) si alte substante bactericide.

### Activ

- pe tot spectrul microbial: bacterii (inclusiv Mycobacterii), fungi, virusuri (HBV/HCV, HIV, Rotavirusuri, Adenovirusuri, Papova, Vaccinia, virusuri herpetice)

### Domenii de utilizare

-



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- dezinfectia aparaturii medicale din blocurile operatorii, laboratoare, sectii A.T.I., sali de nastere, sali de tratamente, cabinete medicale individuale și cabinete stomatologice.
- dezinfectia dispozitivelor medicale, precum și a stetoscoapelor, termometrelor, instrumentarului mic

## INCIDIN LIQUID

- - compatibil cu toate materialele (mai puțin Plexiglas și materiale sensibile la alcoolii)
- - actiune ultrarapida de dezinfectare
- - miros placut
- - ușor de manipulat prin sprayere

## Mod de utilizare

INCIDIN LIQUID - se foloseste nediluat, prin pulverizare asupra aparaturii medicale sau asupra suprafetelor de dezinfectat (curățate în prealabil), de la o distanta de 30 cm (aproximativ 30 ml/m<sup>2</sup>). Se lasa sa se evapore.

Se mai poate aplica și prin stergere cu laveta.

TIMP DE ACTIUNE: 5 MINUTE.

## Prezentare

- Bidon de plastic 5L