

Sigilant Champ Sealant Unidoza EXP 19.01.2025

Pret:

4,80 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Champ este un material pentru sigilarea santurilor si fosetelor dentare, ambalat la unidoze -sistemul nostru patentat: LolliPack®. Fiecare unidoza contine 0.25 ml. de material si cate o pensula aplicatoare Benda® Brush.

Tot ce iti trebuie este intr-un singur pachet !

Indepartati folia protectoare, inmuati pensula aplicatoare, pensulati pe dinte si fotopolimerizati.

E chiar atat de simplu.

Fara seringi si aplicare incomoda. Nu aveti nevoie de bonding, ci doar de curatarea dintelui.

Champ contine o rasina care tolereaza umiditatea, si care previne microinfiltratiile.

Nu contine: Bisphenol A, Bis-GMA, sau Bis-DMA.

- Pentru sigilari simple sau sigilari extinse.

- Nu necesita bonding. (adeziv)
- Elibereaza fluor.
- Rezista aproximativ 3 ani pe suprafetele ocluzale si aproximativ 5 ani pe suprafetele linguale, palatinale si vestibulare.
- O simpla aplicare cu pensula de la un cuspid la altul a materialului este suficienta pentru sigilare perfecta.
- Mult mai usor de aplicat decat materialele ambalate la seringi.
- Tot ce ai nevoie, intr-un singur pachet: sigilantul si pensula aplicatoare.
- Fara contaminare incrucisata.
- Control perfect al stocurilor, si al pretului per aplicare.

Procedura de aplicare:

- Curatati smaltul prin periaj cu produse care nu contin uleiuri. Indepartati toate depunerile.
- Spalati bine, indepartand toate rezidurile de la pasta abraziva din santuri si fosete.
- Daca este nevoie indepartati smaltul care prezinta probleme(odontoplastie).
- Izolati zona care urmeaza sa fie supusa sigilarii si uscati usor.
- Demineralizati suprafata dintelui prin aplicarea de acid fosforic timp de 15 secunde. Spalati riguros.
- Uscati usor si indepartati surplusul de umiditate cu o buleta sau prin uscare cu aer comprimat.
- Lasati suprafata dintelui usor umeda. Champ adera chiar si de suprafetele umectate usor de saliva; Oricum este indicat ca saliva sa nu patrunda in zona care urmeaza sa fie sigilata.
- Desfaceti unidoza de Champ, tragand de folia protectoare pana sunt expuse pensula si godeul cu material sigilant.

- Scoateti pensula aplicatoare.

- Aplicati o pelicula subtire de Champ - Material Sigilant in zona aflata in tratament. Pensulati de la un cuspid la altul fara a aplica pe crestele de smalt.

- Fotopolimerizati. Materialul se fotopolimerizeaza cu orice tip de lampa. Timpul de fotopolimerizare pentru o lampa cu halogen cu puterea de 300mW/cm², este de 20 de secunde.
- Lampile mai puternice, sau LED vor actiona mai rapid.

- Verificati si adaptati ocluzia daca este necesar.
- Aruncati toate materialele folosite: Pensula si godeul Champ.

Proprietati fizice:

- Compressive strength: 44,500 (1400) p.s.i.
- Diametral tensile strength: 7,600 (1050) p.s.i.
- Retention value: 32 kg (non-threaded titanium post)
- Film thickness: 12 microns

Contraindicatii:

- Champ este contraindicat la pacientii care au alergii la oricare din produsele continute.
- Nu aplicati peste suprafete care prezinta proces carios.

Prezentare

- 1 x unidoza Lollipop 0.25 ml continand si pensula aplicatoare