



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Opalescence PK 16% Peroxid Carbamida

**Pret:**

**329,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

OPADESCENCE este primul tratament profesional de albire a dintilor acceptat de catre ADA (American Dental Association), cu care se obtin rezultate semnificative in decurs de doar citeva zile. Este disponibil numai prin cabinetele stomatologice si se realizeaza doar sub monitorizarea medicului stomatolog. Se prezinta sub forma unui gel transparent, foarte viscos, aderent, al carui ingredient activ este peroxidul de carbamid (16%) si care are un pH de aproximativ 6,5. Printre caracteristicile sale deosebite, se numara: eliberarea sustinuta de substanta activa, proprietatile de adezivitate, precum si gutiera de un design special .

Care este procedeul de tratament ?

Medicul stomatolog efectueaza un consult complet pentru evaluarea starii dintilor si a tesutului gingival. Daca exista carii, acestea trebuie obturate. Se va lua o amprenta in vederea realizarii gutierei. Apoi, dupa ce gutiera a fost confectionata, medicul stomatolog va va explica cum trebuie folosit gelul OPADESCENCE. Majoritatea pacientilor prefera sa foloseasca gelul in timpul somnului ( pe parcursul noptii). Durata tratamentului va fi decisa de medicul stomatolog. Majoritatea pacientilor au nevoie doar de 3-8 nopti de tratament.

In majoritatea cazurilor, OPADESCENCE s-a dovedit eficient in indepartarea petelor de culoare de pe dinti prezente inca din perioada de eruptie a dintilor, precum si a celor aparute de-a lungul timpului. Petele de culoare de pe dinti pot aparea datorita unor afectiuni medicale, a unor medicamente, traumatisme, precum si



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

datorita consumului de tutun, cafea, ceai, coca-cola sau a anumitor alimente. S-au obtinut succese in cazul indepartarii petelor de tetraciclina, sau a celor datorate fluorozei.

Cercetarile efectuate si experienta acumulata in folosirea acestui produs, arata ca rezultatele obtinute in urma tratamentului se pastreaza ani de zile. Este posibil ca dintii sa se coloreze din nou intr-o oarecare masura daca vin in contact cu tutun, ceai sau cafea. Cu toate acestea, dintii vor ramine semnificativ mai albi decit au fost inainte de inceperea tratamentului. Rezultatele tratamentului pot varia intre pacienti in functie de tipul dintilor si tipul petelor de culoare. Unii pacienti pot dezvolta o sensibilitate termica crescuta la rece in timpul tratamentului de albire. Se intrerupe tratamentul si aceasta sensibilitate se remite in 1-3 zile. Pentru aceasta sensibilitate, medicul stomatolog va poate recomanda un gel desensibilizant ca de exemplu: ULTRALEZ sau FLOR-OPAL ( produse ale companiei ULTRADENT ). Ca o masura de precautie, acest gel de albire nu trebuie folosit in timpul sarcinii. De asemenea, este recomandabil sa se evite consumul de tutun si alcool in timpul tratamentului.

## INDICATII FOLOSIRE

In primul rand, spalati dintii folosind pasta de dinti OPALESCENCE.

Dupa indepartarea capacului seringii cu gel OPALESCENCE, exprimati continutul in portiunea cea mai adanca a gutierei si catre partea faciala a gutierei. Pe partea linguala si pe partea faciala a molarilor se va folosi o cantitate mai mica de substanta. Aproximativ 1/2 din cantitatea de gel din seringa va fi suficienta pentru o arcada.

Se va fixa gutiera complet si ferm pe dinti. Utilizand o periuta de dinti moale, servetel sau cu degetul curat, se va indeparta usor excesul de gel care poate depasi marginile gutierei. Se va clati gura de doua ori, usor cu atentie, avand grija sa nu inghititi.

Gutiera se va purta de obicei, pe timpul noptii, exista totusi multi pacienti dispusi sa poarte gutiera in timpul activitatii zilnice. Dupa timpul prescris, gutiera se va indeparta. Periati dintii si clatiti bine, astfel incat sa nu ramana gel pe dinti si in gutiera.

Gutiera va fi indepartata inainte de a manca si/sau bea lichide. **NU SE VA FUMA** in timpul tratamentului de albire a dintilor.

1. Dintii sunt in mod natural, mai inchisi la baza (spre gingie). Aceste zone necesita mai mult timp pentru albire, decat restul dintelui si de obicei, raman usor mai inchisi.
2. Un mic procent de pacienti dezvolta sensibilitate in timpul albirii dintilor. Se recomanda purtarea gutierei cu pauze intre nopti sau in timpul zilei pentru 2-3 ore sau se utilizeaza un gel cu fluor in gutiera.
3. Hrana si fructele bogate in acid citric pot produce sensibilizarea dintilor.
4. Unii pacienti au prezentat un disconfort temporar al gingiilor, limbii, gitului, sau buzelor. Daca aceste



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

simptome apar si se mentin mai mult de 2 zile sau se agraveaza contactati stomatologul dumneavoastra.  
Aceste efecte dispar in 1-3 zile dupa intreruperea tratamentului.

5. Hrana, bauturile si tutunul pot recolora dintii de-a lungul timpului. Dintii pot fi realbiti, utilizand gutiera pentru 1-2 nopti.

6. Controlul si curatarea regulata a dintilor inainte si dupa albire, sunt importante pentru a mentine un zimbet sanatos.

7. Nu se va lasa la indemana copiilor.

8. Obturatiile de amalgam pot produce o culoare gri in gutiera;

VA RUGAM

NU se va utiliza sistemul de albit dintii OPALESCENCE in timpul sarcinii sau lactatiei;

NU se va minca, bea sau fuma in timpul purtarii gutierei;

NU se vor expune seringile cu gel la soare;

NU vor ingheta seringile cu OPALESCENCE.

Prezentare

- kit 8 seringi x 1,2g
- cutie gutiera
- pasta Opalescence mica