



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Opalescence Endo 35% Peroxid Hidrogen

Pret:

519,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Opalescence ENDO este o formula speciala cu 35% peroxid de hidrogen pentru albirea dintilor devitali colorati . Produsul este destinat numai uzului in cabinetul stomatologic.

INDICATII DE FOLOSIRE

Este important sa nu plasati gelul de albire sub creasta alveolara si sa se sigileze cu material de obturatie canalul radicular.

- 1) Examinare radiologica pentru vizualizarea obturatiei de canal si inaltimea crestei alveolare.
- 2) Evaluati asteptarile pacientului de la acest tratament si explicati limitele rezultatelor.
- 3) Indepartati materialul de obturatie din dreptul accesului in canal pina la limita observata pe radiografie. Tot materialul temporar sau definitiv din camera coronara si din dreptul accesului in canal pentru a lasa gelul sa-si exercite actiunea si sa vina in contact cu suprafata dintelui.
- 4) Aplicati un strat subtire de glassionomer universal (1-2 mm) la intrarea in canalul radicular petru a sigila perfect.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 5) Atasati aplicatorul Blac mini Tip la seringa de Opalescence si introduceti gelul in camera coronara. Lasati 1-1.5 mm spatiu pentru materialul de obturatie provizorie. Daca ati atins mucoasa cu gel, spalati din abundenta cu apa zona respectiva.
- 6) Plasati un material fara eugenol in compositie pentru sigilarea cavitatii. Verificati ocluzia si contactele premature.
- 7) Repetati aceeasi procedura la un interval de 3 pina la 5 zile pina obtineti nuanta deschisa a dintelui.
- 8) Indepartati materialul provizoriu si gelul de albire pina la glassionomer. Clatiti si curatati camera coronara. Restaurati cu compozit fotopolimerizabil cavitataea.

PRECAUTII

1. Repetarea albirii este recomandata daca apare regresia culorii
2. Incercati sa aflati asteptarile fiecarui pacient inainte sa incepeti albirea.
3. Nu se injecteaza materialul.
4. Materialul trebuie depozitat la rece, in frigider pentru a-si pastra termenul de valabilitate.
5. Aruncati seringile goale in locuri indicate.
6. Nu lasati produsul la indemina copiilor.
7. Nu folositi Opalescence daca pacientul este alergic la peroxid, carbopol, glicerine, etc.
8. Nu lasati Opalescence sa atinga tesuturile moi.

Kit-ul contine:

- gel pentru albire 2 seringi x 1,2 cc
- 20 aplicatoare