



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Opalescence Go 6%



Pret:

468,71 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Opalescence GO Patient Kit Mint 6% - sistem de albire pentru acasa pe baza de peroxid de hidrogen 6% in gutiere preformate

Avantaje:

- Peroxid de hidrogen - rezultate rapide si de calitate superioara
- Gutiere preformate cu design imbunatatit- confort sporit datorat materialului moale, subtire si extrem de flexibil, un material care se adapteaza foarte bine pe arcade
- Albire rapida, sensibilitate scazuta si o buna protectie a smaltului datorata formulei Opalescence PF
- Suportul exterior al gutierei permite o fixare si centrare rapida si automata a acesteia
- Gutiera interioara - flexibila, se adapteaza foarte usor pe orice arcada
- Gutiere preformate - se economiseste timpul pierdut cu luarea amprentelor si realizarea gutierelor individuale
- Gutierele sunt umplute cu o cantitate optima de gel - spalare rapida si usoara dupa albire

Instructiuni de utilizare:

- Se identifica lingurile ce urmeaza a fi folosite dupa marcajele de pe maner - lingura superioara este marcata cu litera U (upper), lingura inferioara este marcata cu litera L (lower)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Desigilati o pereche de linguri
- Se centreaza lingura de plastic pe arcada
- Se preseaza gutiera pe dinti
- Se indeparteaza lingura colorata
- Se ajusteaza pozitia gutierei
- Gutiera se poarta timp 60-90 de minute

Indicatii:

- Albirea se face numai pe dintii naturali vitali (care nu au avut tratament pe canal de indepartare a nervului) sau devitali (care au suferit tratamente pe canal pentru indepartarea nervului, canalul radicular fiind sigilat in urma tratamentului)
- Pentru fumatorii care doresc readucerea dintilor la culoarea lor naturala
- Persoanele care sufera de fluoroza trebuie sa execute tratamentul de albire pe o perioada mai indelungata
- Persoanele cu pete de decalcifiere - rezultatele se pot observa intr-un timp scurt, albirea putand fi realizata chiar si numai cu o cutie de Opalescence GO. La finalul tratamentului dintii vor avea o culoare uniforma si petele vor fi mult mai atenuate
- Persoanele cu pete de tetraciclina (coloratie de un brun inchis, aparuta in urma eruptiei dintilor definitivi) necesita un tratament cuprins intre 6 si 9 luni. Tratamentul nu trebuie sa fie realizat in mod continuu, putand fi facut si in etape cu pauze saptamanale

Contraindicatii:

- Nu se recomanda tratamentul cu Opalescence GO femeilor gravide sau care alapteaza, copiilor pana la 14 ani, persoanelor care au numai restaurari protetice in zona frontala si laterala, persoanelor cu benzi transversale de tetraciclina
- Nu se albesc molarii de minte
- Persoanele cu afectiuni grave (carii, gangrene, canale deschise, dinti mobili) trebuie sa consulte medicul stomatolog
- A nu se inghiti gelul de gutiera

Prezentare:

- Opalescence GO Patient Kit Mint 6% - 1 kit x 10 gutiere preformate