



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## RTR Cone

Pret:

**616,60 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Inlocuitor steril resorbabil de os.

### Descriere

Fosfatii de calciu care alcatuiesc RTR sunt fabricati dupa tehnologiile cele mai recente permitand asigurarea unei excelente calitati si puritati a acestui produs.

RTR Cone este constituit din granule de fosfat tricalcic  $\ddot{Y}$  prinse intr-o matrice de fibre de collagen de origine bovina inalt purificate si conforme cu criteriile de securitate impuse de OMS si Uniunea Europeana

### Proprietati

RTR se prezinta sub forma unor granule de granulometrie intre 500  $\text{\AA}\mu\text{m}$  si 1 mm.

Macroporii au o marime ce variaza intre 100  $\text{\AA}\mu\text{m}$  si 400  $\text{\AA}\mu\text{m}$  si microporii sunt mai mici de 10  $\text{\AA}\mu\text{m}$ .

Aceste proprietati structurale specifice permit o colonizare macroporilor de care osul neoformat.

RTR este progresiv resorbabil.

### Indicatii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

RTR cone este destinat umplere pierderilor osoase dupa impregnarea cu sangele pacientului sau cu ser fiziologic, mai ales prin umplerea alveolelor.

RTR cone este recomandat in cazul cavitatilor ce nu pot fi inchise, avand grija pentru evitarea pierderilor granulelor in exteriorul cavitatii

#### Contra-indicatii

- Osteomielita acuta sau necroza locului receptor
- Degenerescenta osoasa
- Infectie cunoscuta
- Alergie la unul din constitienti

#### Mod de folosire

RTR cone este pus in alveola si se are grija ca aceasta sa fie umpluta cu sange. Desi o sutura a locului operator este intotdeauna preferabila, totusi, in cazul in care nu este realizabila, trebuie urmarita protectia conului de marginile plagii.

#### Prezentare

2 conuri de 0,3 cm<sup>3</sup> (Ø 6 mm, H 10 mm) ambalate individual si sterilizate prin raze gamma.