




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Camp operator 38 x 45 cm

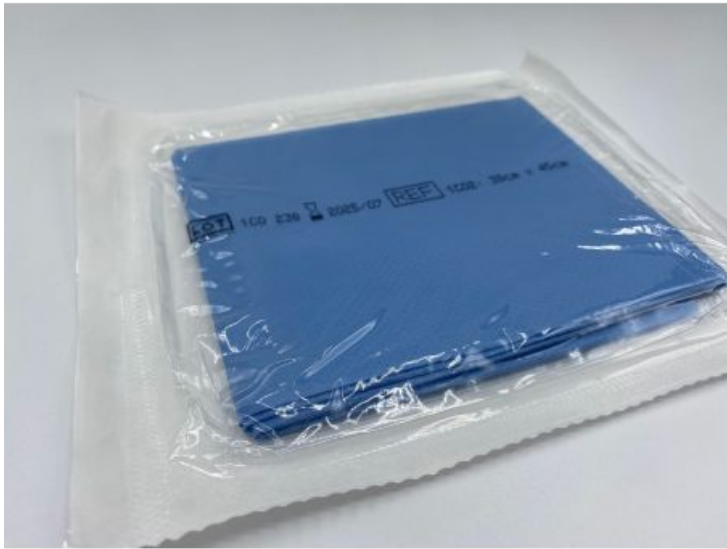

**Pret:**

**3,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

### **Forma de prezentare:**

Campul operator este confectionat din material bilaminar sau material trilaminar, conditionat, in ambalaj individual (un camp operator / pungă), steril. Dimensiune 38 x 45 cm

### **Proprietati:**

- Barieră microbiană
- Strat absorbant

### **Indicatii:**

- Bloc operator
- Interventii de mica chirurgie
- Cabinete medicale
- Cabinete stomatologice



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Precautii:**

- Produsul este de unică folosință. A nu se resteriliza !
- A se feri de umiditate, lumină și căldură.

### **Mod de folosire:**

Punga pelabilă ce conține un câmp operator steril, se deschide în partea superioară a acesteia, unde se află inscripționat semnul distinctiv. Datorită modului special de pliere a câmpului operator, acesta se poate întinde ușor și rapid.

În funcție de natura intervenției chirurgicale, se poate alege dimensiunea optimă a câmpului operator ce urmează a fi utilizat.

Câmpul operator se aplică pe zona de intervenție, cu stratul din netesut în exterior, ceea ce asigură o bună absorbție a fluidelor.

Câmpurile operatorii Velfina sunt sterilizate prin radiații gamma sau cu etilen oxid, pe baza unor procese de sterilizare validate în conformitate cu EN 552, respectiv EN 550.

Verificați integritatea pungii și data de expirare a produsului înainte de utilizare !